

# Offrant ainsi une routine sûre et adaptable pendant la chimiothérapie

Étude de cas soumise par  
Kate Slattery, infirmière stomathérapeute, Irlande.

## Antécédents

- Homme de 77 ans
- Mode de vie actif, joue au golf deux fois par semaine.
- Diagnostic d'un cancer du rectum en octobre 2020.
- Résection antérieure avec formation d'une colostomie de 35 mm à la création.

## Début de la chimiothérapie en décembre 2020

- 10 séances bimensuelles suivies d'une pause de 6 mois.
- Des examens ont montré que le cancer était toujours présent.
- Le traitement de chimiothérapie a repris, à raison d'une séance toutes les 2 semaines pendant une durée indéterminée.

## Routine actuelle

- Utilisation de l'appareillage eakin dot® 2-pièces en raison de la facilité de couplage.
- Le support est changé tous les 4 jours et la poche est changée quotidiennement.



## Défis de la chimiothérapie

### Diarrhées causées par la chimiothérapie

Au cours des cycles de chimiothérapie, les 5e et 6e jours après le traitement, des épisodes de diarrhée apparaissaient. L'appareillage 2-pièces vidable a permis de vider régulièrement la poche plutôt que de la changer. Le patient a pu garder le même appareillage tout au cours du traitement, et aucune fuite n'a été constatée grâce à la routine de soins mise en place.

### Fatigue chronique

Au début, des épisodes de fatigue durant 2 à 3 jours apparaissaient au bout du 5e jour. Plus tard, la fatigue a duré jusqu'à 10 jours. Malgré cela, le patient a toujours été capable de gérer sa routine de manière indépendante.

### Problèmes de dextérité

Une neuropathie s'est développée au niveau des mains et des pieds, entraînant une aversion pour le froid et la nécessité d'utiliser une voiturette pour continuer à jouer au golf. L'homme est toujours capable de gérer ses changements de poche de façon indépendante avec l'appareillage eakin dot® 2-pièces. Aucun problème pour coupler la poche et le support grâce au couplage facile à utiliser.

### Peau péristomiale

Peau sèche et démangeaisons péristomiales occasionnelles. L'ajout d'une pâte de protection péristomiale permet de soulager les démangeaisons et d'hydrater la peau. Aucune fuite ou lésion de la peau péristomiale n'a été constatée malgré des selles irrégulières pendant la chimiothérapie.

### Modifications de la stomie

Une éventration péristomiale s'est développée au cours des premiers cycles de chimiothérapie. La taille de la stomie a augmenté de 5 mm au cours des 6 premiers mois. Le support de l'appareillage a été remesuré, les plis d'aisance adhèrent bien aux contours du corps et l'anneau eakin Cohesive® s'est bien adapté à la nouvelle taille de la stomie. Les renforts eakin Contour™ ont été introduits par mesure préventive contre le soulèvement des bords du protecteur cutané.

**Produits utilisés**  
eakin dot® 2-pièces  
vidable  
Anneau eakin Cohesive®  
small  
Renforts eakin Contour™  
Ceinture eakin®

## Une routine sûre et adaptable avec eakin®

En choisissant **eakin®** pour ce patient sous chimiothérapie, celui-ci a pu maintenir et adapter sa routine de soins en fonction de l'évolution de ses effets secondaires.

eakin **dot®** 2-pièces vidable

- L'anneau de guidage avec soufflet rétractable est facile à clipser – une aide visuelle lorsque la dextérité devient un problème.
- Poche vidable avec un clamp de vidange intégré facile à utiliser pour pouvoir vider la poche régulièrement au lieu de la changer plusieurs fois.
- Les plis d'aisance doux et flexibles s'adaptent aux contours du corps peu importe la morphologie.

L'anneau eakin **Cohesive®**

- Modelable pour s'adapter à la forme et taille changeantes de la stomie afin d'éviter les fuites.
- Apporte une protection supplémentaire contre l'augmentation du débit d'effluents, aucune fuite ou complication péristomiale n'a été constatée.

Refont et ceinture **eakin®**

- Apporte une sécurité supplémentaire contre le soulèvement des bords avec une poche à support plat.

Faites confiance  
à **eakin®** pour  
accompagner  
la chimiothérapie

Aidez vos patients à  
surmonter chaque jour  
difficile

