

# Anneau eakin **Cohesive**<sup>®</sup> stomawrap pour les éventrations et les stomies plus larges



A SMALL PART  
OF A BIGGER LIFE.

## Antécédents

- Homme de 76 ans.
- 2014 : Iléostomie terminale formée en raison d'un cancer colorectal.

## Problèmes Rencontrés

- A développé une éventration péristomiale importante, mais a été jugé inapte à une reprise chirurgicale en raison de multiples comorbidités.
- Prolapsus de la stomie qui mesurait 80 mm.
- Fuites régulières de la poche.
- Essai d'une poche maxi 1-pièce avec un plan de découpe de 80 mm combinée à un anneau.
- Les anneaux devenaient trop fins une fois étirés à 80 mm.

## Conseils de l'infirmière

L'anneau eakin **Cohesive**<sup>®</sup> stomawrap a été recommandé en raison de sa forme unique, mais un seul anneau devenait trop fin une fois étiré..

L'étanchéité a été obtenue en utilisant 2 anneaux eakin **Cohesive**<sup>®</sup> stomawrap en les superposant et en les étirant à 80 mm, afin que l'anneau s'étire complètement autour de la stomie sans devenir trop fin.



## Solution avec eakin **Cohesive**<sup>®</sup> stomawrap

La solution a été utilisée pendant un an et a permis d'obtenir une excellente étanchéité et protection de la peau.

**Peau :** Les fuites sont rares, ainsi la peau péristomiale reste saine.

**Gestion de la stomie :** Il se sent pleinement capable de prendre soin de sa peau péristomiale via l'application de deux anneaux eakin **Cohesive**<sup>®</sup> stomawrap.

**Une vie plus riche :** La durée moyenne de port de l'anneau est de 3 jours, ce qui permet au patient de profiter de sa vie sans se soucier des fuites.

eakin.fr

Etude de cas soumise par :  
Kate Slattery, Stomathérapeute libérale, Irlande