

Anneau eakin **Cohesive**[®] stomawrap pour les stomies volumineuses et prolabées



A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE.

Antécédents

- Homme de 72 ans
- Février 2018 : Cancer colorectal entraînant une résection intestinale avec large iléostomie en boucle.
- Juillet 2020 : Le cancer a progressé et l'homme a été orienté vers les soins palliatifs.

Problèmes Rencontrés

- Un prolapsus des deux extrémités de l'iléostomie en boucle a compliqué la mise en place d'un anneau et d'une poche en raison de la difficulté à visualiser la peau péristomiale.

Conseils de l'infirmière

En raison de la difficulté à voir la boucle de l'iléostomie, il a été suggéré d'utiliser un anneau protecteur eakin **Cohesive**[®] stomawrap pour faciliter la mise en place.

En raison d'un prolapsus au niveau de la stomie, la découpe du support a été légèrement agrandie pour faciliter la mise en place - laissant des espaces entre le support et la stomie. L'anneau protecteur eakin **Cohesive**[®] stomawrap a comblé ces espaces, s'adaptant parfaitement sous le support.



Pour des raisons visuelles, et afin de montrer la jonction, l'anneau eakin **Cohesive**[®] Stomawrap est appliqué sans être ajusté.



Solution avec eakin **Cohesive**[®] stomawrap

Peau : Aucune fuite ne s'est produite et la peau est restée en très bon état.

Gestion de la stomie : L'utilisation de l'anneau eakin **Cohesive**[®] stomawrap a permis au patient d'attacher facilement les deux extrémités au-dessus de sa stomie, créant un **ajustement sûr au toucher**.

Une vie plus riche : Gagner en indépendance dans la prise en charge de la stomie lui a permis de ne plus dépendre de l'aide d'autrui et de poursuivre sa routine normale.

Soins continus

- L'état de santé de ce patient s'est détérioré et il a dû faire appel à un auxiliaire de santé pour l'aider à prendre soin de sa stomie.
- Le soignant avait une expérience minimale des soins de stomie, mais il a trouvé l'application de l'anneau eakin **Cohesive**[®] stomawrap simple.
- La peau est restée en très bon état.

eakin.fr

Etude de cas soumise par :
Kate Slattery, Stomathérapeute libérale, Irlande