

Anneaux eakin **Cohesive** SLIMS® pour renforcer la confiance en soi



A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE.

Antécédents

- Homme très actif avec de jeunes enfants.
- Opération en urgence et non planifiée.
- Pas d'autonomie - sa femme s'occupe de sa stomie.
- Se sent limité dans ses mouvements.

Problèmes Rencontrés

- La poche fuit autour de la stomie, entraînant une rétention d'humidité.
- La peau péristomiale est excoriée, ce qui engendre douleur et inconfort.
- Perte de confiance et anxiété quant à l'avenir.
- Utilisation d'une poche à support plat et nécessité de le renforcer plusieurs fois avec du ruban adhésif ordinaire pour la faire adhérer.

Conseils de l'infirmière

Utiliser un anneau eakin **Cohesive** SLIMS® sous une poche convexe souple avec une petite quantité de pâte eakin **Cohesive**® pour créer une surface lisse. Arrêter l'utilisation de ruban adhésif.

Il a été conseillé de changer de poche tous les deux jours, même s'il n'y avait pas de fuite, afin d'inspecter et de nettoyer la peau et de s'assurer qu'elle guérissait.

Solution avec les anneaux eakin **Cohesive**®

Après une semaine d'utilisation

- La peau s'était considérablement améliorée et la douleur avait diminué.
- Pas de sensation de brûlure ni de fuites.
- Durée de port de la poche prolongée.

Moins d'un mois après la consultation initiale

Peau : Pas de douleur, d'inconfort ou d'excoriation.


Gestion de la stomie : Il est maintenant totalement indépendant et se sent capable de gérer sa stomie.

Une vie plus riche : La confiance a été rétablie - le stress et l'inquiétude concernant l'avenir ne sont plus un problème majeur. Il a repris ses activités quotidiennes normales et une vie active.


1 jour



1 semaine

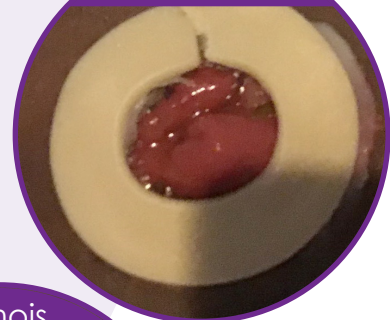

1 mois

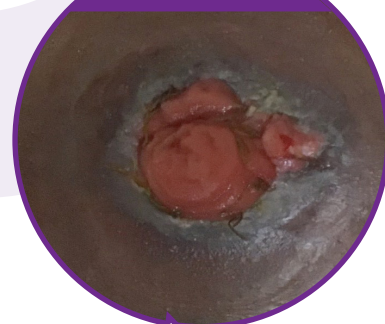

*"Il est évident que le simple fait d'ajouter un anneau eakin **Cohesive**® peut apporter une amélioration considérable à la vie de tous les jours."*