

Choisissez eakin dot® 1-pièce pour aider à résoudre les problèmes de peau péristomiale



4 raisons de l'utiliser:

1. Reste en place plus longtemps, ce qui aide à prévenir les fuites^{1,2}
2. Moins de temps passé à changer la poche^{1,2}
3. Amélioration de la qualité de vie : retour à l'autonomie, intégrité de la personne^{1,2}
4. Une sécurité et un confort accrus pour le patient^{3,4}

Antécédents de la patiente:

- Femme de 81 ans, dénutrie.
- Février 2023 - Réalisation en urgence d'une colectomie droite avec une colostomie transverse droite. La patiente a du mal à accepter la situation et a le sentiment de perdre son autonomie.
- Transit liquide et stabilisé avec 3 immodiums par jour.
- Avril 2023 : Début du traitement par chimiothérapie.



Problèmes:

- La patiente est sortie en convalescence avec un appareillage de marque différente.
- Après 1 mois d'essai avec différents produits de stomathérapie (2-pièces, puis 1-pièce, anneaux, poudre, pâte et ceinture) elle rencontre encore des fuites quotidiennement (jusqu'à 4 fois par jour).
- La peau péristomiale est très irritée.



Résultats obtenus avec eakin dot® 1-pièce convexe souple:

- L'infirmière stomathérapeute a conseillé l'essai d'eakin dot® 1-pièce vidable prédécoupé pour la souplesse de sa convexité et sa durée de port prolongée. Elle a également utilisé de la poudre, de la pâte et une ceinture.
- Après 2 semaines d'utilisation, la peau péristomiale a cicatrisé et il n'y a plus de fuite.
- La patiente n'a plus besoin d'utiliser de poudre ni de pâte car les problèmes ont été résolus mais elle continue avec une routine de soins simple avec eakin dot®, une ceinture et les renforts eakin contour™ pour plus de sécurité.
- Les soins sont simplifiés et réalisés par les infirmières libérales à domicile. Cela a permis à la patiente de reprendre confiance. Elle a pu reprendre ses activités quotidiennes comme sortir avec ses amies et jardiner.



Preuves cliniques en faveur d'eakin dot® 1-pièce convexe souple:

- L'hydrocolloïde *skinsmart*™ est cliniquement prouvé comme offrant une plus grande sécurité et une plus longue durée de port de la poche par rapport aux autres hydrocolloïdes disponibles⁴
- Le soin est facilité grâce à un changement de poche plus simple.^{1,2}