

Choisissez
la poche
d'urostomie
eakin® 1-pièce
convexe souple
en cas d'irritation
cutanée*.

*Le patient de cette étude de cas a été évalué et conseillé par une infirmière stomathérapeute.

3 raisons de l'utiliser:

1. Prévient les fuites et les irritations cutanées¹
2. Sensation de sécurité et agréable à porter¹
3. Durée de port prolongée par rapport à la poche précédente¹

Étude de cas soumise par:

PIERRE-JOSEPH, Infirmière
Stomathérapeute, Pitié-Salpêtrière, Paris

1. eakin1-piece soft convex nurse case study, Data on File, 2021

Antécédents du patient:

- Urostomie/Bricker depuis mai 2019.
- Peau péristomiale irritée, ulcérée et extrêmement douloureuse.
- Cristaux urinaires.
- Hernie parastomale.



Problèmes/examen par l'infirmière:

- Problème récurrent de fuites de la poche.
- Couper les poils péristomiaux avec des ciseaux.
- Appliquer de la poudre et un spray protecteur.
- Appliquer l'anneau eakin **Cohesive**® slim et la poche d'urostomie eakin 1-pièce.
- Commencer par des compresses de solution d'eau et de vinaigre blanc pendant 10 minutes.
- Boire du jus de canneberge.



Résultats obtenus avec eakin® 1-pièce convexe souple:

- Plus de douleur et la peau péristomiale est complètement guérie.
- Plus de fuites de la poche.
- Le problème des cristaux urinaires est résolu.
- Facilité d'utilisation de l'appareillage pour le patient. Confort et flexibilité.
- Le patient ne dépend plus des visites de l'équipe de soins à domicile et est capable de gérer sa stomie avec l'aide de sa femme.