

Étude de cas soumise par: Pia Petersen, infirmière stomathérapeute, Danemark

### 4 raisons pratiques :

1. Prolonge la durée d'utilisation de la poche<sup>1,2</sup>
2. Meilleur maintien autour de la stomie<sup>1</sup>
3. Renforce la sécurité, le confort et la confiance du patient<sup>1,2</sup>
4. Support souple à plis d'aisance qui épouse les contours du corps<sup>1</sup>



## HISTOIRE DE KAJ

### Antécédents médicaux :

- Homme de 61 ans
- **1978** : Iléostomie réalisée en raison d'une colite ulcéreuse
- **1979-2012** : A réussi à gérer sa stomie en utilisant un système 2-pièces support plan
- **2012** : Réalisation d'une nouvelle iléostomie suite au diagnostic de la maladie de Crohn et autres complications

### Problèmes :

- La nouvelle stomie se rétracte par épisode au niveau de la peau
- Plusieurs appareillages 1- et 2-pièces convexes testés sans succès
- Le patient a conservé sa marque préférée et essayé un appareillage 2-pièces modelable convexe ainsi qu'un anneau protecteur
- Poursuite des fuites récurrentes
- Formation d'une petite éventration
- La consistance des selles passe de semi-liquides à liquides



### Succès avec l'appareillage eakin dot® 2-pièces convexe souple :

- Jusqu'à 7 jours d'utilisation sans fuites ni problèmes cutanés (eakin dot® 2-pièces convexe souple et un anneau eakin Cohesive SLIMS®)
- Le support est plus souple et plus confortable à porter
- Sentiment de sécurité accru
- Le support convexe souple à plis d'aisance s'est bien adapté à son éventration

*"Après avoir été fidèle pendant 40 ans à une marque, j'ai choisi eakin dot®"*

Kaj, Danemark



### Preuves cliniques pour choisir l'appareillage eakin dot® 2-pièces convexe souple :

- Il est cliniquement prouvé que le protecteur cutané *skinsmart*® procure une adhérence plus efficace et offre une sécurité renforcée, prolonge la durée d'utilisation de la poche et est plus respectueux de la peau, comparé aux autres appareillages leaders du marché<sup>1</sup>
- Le support convexe souple procure un meilleur maintien autour de la stomie<sup>§,1</sup> et élimine les risques d'ulcère qui causent des points de pression<sup>3</sup>
- 100 % des utilisateurs sont d'accord pour dire que l'appareillage eakin dot® s'adapte aux contours du corps<sup>1</sup>