

# eakin **Cohesive**<sup>®</sup> large pour la gestion des peaux fortement excoriées

Étude de cas soumise par :

Alexandra Esteban, infirmière stomathérapeute, CHG, Montauban, France

## Antécédents

- Femme de 66 ans.
- Alitée avec une colostomie en urgence suite à un épisode obstructif.
- Mars 2022 - Hospitalisée dans le service de chirurgie digestive où les soins à sa stomie ont été pris en charge.
- La routine de stomie consistait en une poche plate vidable Coloplast Sensura Mio 2 pièces – 70 mm, et un spray de retrait d'adhésif Brava.
- À sa sortie de l'hôpital, la patiente est restée dans une unité de soins pour personnes âgées où elle dépendait du personnel soignant pour gérer sa stomie.


## Problèmes rencontrés

- Le manque de qualification des soignants a entraîné une mauvaise gestion de la routine de soins à la stomie de la patiente, ce qui a favorisé des fuites persistantes.
- De plus, les soignants n'étaient pas disponibles la nuit en cas de fuite de la poche.
- Les fuites de la poche ont entraîné une macération péristomiale importante.
- De nombreux appareils et accessoires ont été essayés sans parvenir à rétablir l'intégrité de la peau péristomiale.

## Conseils de l'infirmière

Après avoir essayé de nombreuses marques de produits pour stomie, **eakin**<sup>®</sup> a été présenté comme une solution aux problèmes de peau péristomiale et comme un moyen d'assurer une routine sûre à long terme.

En raison de la facilité d'utilisation des produits et de leur innocuité pour la peau, eakin **dot**<sup>®</sup> 2 pièces convexe souple vidable – 80 mm, l'anneau eakin **Cohesive**<sup>®</sup> large, les supports de poche eakin contour<sup>™</sup>, la pâte eakin **Cohesive**<sup>®</sup> et une ceinture pour stomie ont tous intégré cette nouvelle routine.

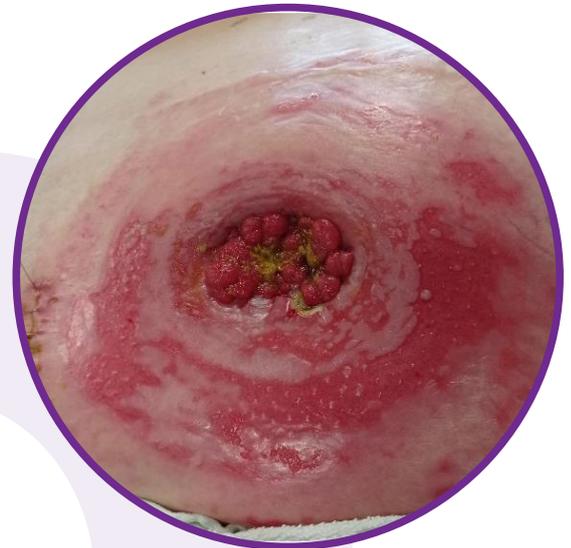

## Résultats obtenus grâce à eakin Cohesive® large


Grâce aux recommandations, le personnel de l'unité de soins aux personnes âgées sait désormais gérer la routine de soins de la stomie de cette dame, ce qui a permis une amélioration significative.

**La peau:** L'intégrité de la peau s'est rétablie après la macération péristomiale et aucune allergie aux produits n'a été observée.

**Gestion de la stomie:** Aucune fuite n'a été observée et l'équipe soignante se sent en confiance pour la gestion de la routine de soins à la stomie.

*« Il est important et indispensable de fournir des protocoles de soins aux professionnels de la santé, voire de réaliser des photomontages, afin d'uniformiser les pratiques professionnelles et d'éviter ainsi l'apparition de problèmes. »* Alexandra Esteban

Mesure précise de la stomie

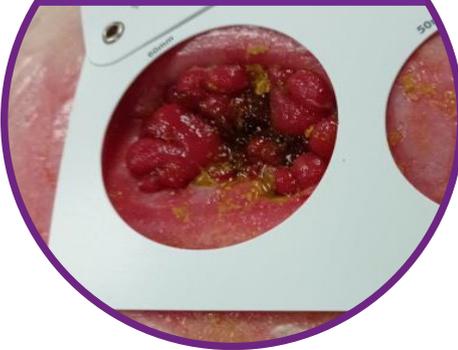

Pose correcte de l'anneau Cohesive® large



Application du support



Application de la pâte eakin Cohesive® pour plus de sécurité



Clipser la poche eakin dot® sur le support eakin™ contour pour une sécurité accrue.



### Produit eakin® utilisé

Support eakin dot® 2 pièces 80 mm	839830
Poche vidable eakin dot® standard	839922
eakin Cohesive® large	839001
pâte eakin Cohesive®	839010
Renforts de poche eakin contour™	839040
Ceinture de stomie réglable	839520