

pour la prise en charge d'une iléostomie à fleur de peau avec selles liquides entraînant des complications cutanées péristomiales

Étude de cas soumise par Marjon Gerbrands, infirmière stomathérapeute, Pays-Bas

Antécédents

- Femme de 77 ans, perte auditive profonde depuis l'âge de 3 ans (rougeole).
- 2015 : Infarctus cérébral, qui n'a été découvert qu'en 2016.
- 2017 : Iléus colique conduisant à une résection.
- Tumeur de l'intestin grêle découverte lors de l'intervention chirurgicale nécessitant une nouvelle résection et la formation d'une iléostomie.
- L'infarctus précédent a provoqué une paralysie faciale entraînant une dysphagie.
- 2018 : Alimentation par sonde via le bouton de gastrostomie Mic-Key, entre 7h00 et 19h00.
- Alimentation par sonde à 100 % : toutes les heures 100 ml de nutrition et 90 ml d'eau.
- Effluents extrêmement liquides - 600-700 ml/24 heures.
- Le mari s'occupe des soins de stomie.

Problèmes rencontrés

- La prise de poids postopératoire de 52 kg a fait que la stomie est à fleur de la peau.
- Présence de creux sur la peau autour de la stomie.
- Complications et infections continues de la peau péristomiale et présence d'une hypergranulation.
- Tentative de prévention des infections par l'utilisation d'une pâte alcoolisée, et d'un anneau protecteur.
- Les fuites et l'infection de la peau péristomiale sont restées.
- Changements quotidiens en raison des fuites constantes.

Conseil de l'infirmière

Malgré l'alternance de poches 1 et 2-pièces, la pâte, les anneaux ainsi que des renforts périphériques pour tenter de limiter les problèmes rencontrés, **l'hypergranulation et la peau péristomiale douloureuse sont restées.**

En août 2021, permission donnée par Kim van der Maas, infirmière stomathérapeute au Radboudumc, de tester le nouvel anneau eakin **freeseal**[®].

Avant



Résultats obtenus grâce à l'anneau eakin freeseal®

Après trois ans et demi de recherche d'une solution, eakin **freeseal®** a eu un impact considérable sur les soins de stomie de cette dame.



Peau : L'irritation cutanée a rapidement diminué et a finalement disparu. Il n'y a plus de fuites, de ce fait, sa peau péristomiale a complètement guéri et l'hypergranulation n'est plus présente.

Gestion de la stomie : Un seul changement de poche tous les 2 jours est nécessaire, la poche étant vidée 3 à 4 fois par jour en raison des selles liquides.

Une vie plus riche : La dame se sent sereine grâce à eakin **freeseal®**. Son mari est ravi qu'il soit facile à utiliser et qu'il s'adapte à la forme de sa stomie - créant ainsi une routine de soins de stomie sûre.

Impact économique d'eakin freeseal®

Dans cette étude, les changements quotidiens de soins de stomie sont passés de 1 par jour à 1 tous les 2 jours. En conséquence :

L'utilisation de produits a été réduite de 48%.*

Cela induit des impacts positifs potentiels, notamment :

- réduction du coût annuel des produits pour stomie.
- aucun besoin de produits supplémentaires pour traiter les complications de la peau péristomiale et l'hypergranulation.
- Amélioration de la peau.
- réduction du temps de soins infirmiers nécessaire pour traiter les complications supplémentaires de la personne stomisée.
- impact environnemental positif dû à la réduction de l'utilisation des produits de stomie.

Et, plus important encore, **les avantages en termes de qualité de vie pour la dame elle-même.**

* basé sur une utilisation moyenne de la poche et des anneaux détaillés dans cette étude de cas.



Amélioration
de la peau