


DIFFICULTÉS D'APPRENTISSAGE  
DÉFICIENCE VISUELLE  
MOBILITÉ RÉDUITE  
MAUVAISE DEXTÉRITÉ

Choisissez l'appareillage  
eakin **dot**<sup>®</sup> 2-pièces pour  
aider une personne  
stomisée ayant des  
**besoins spécifiques**

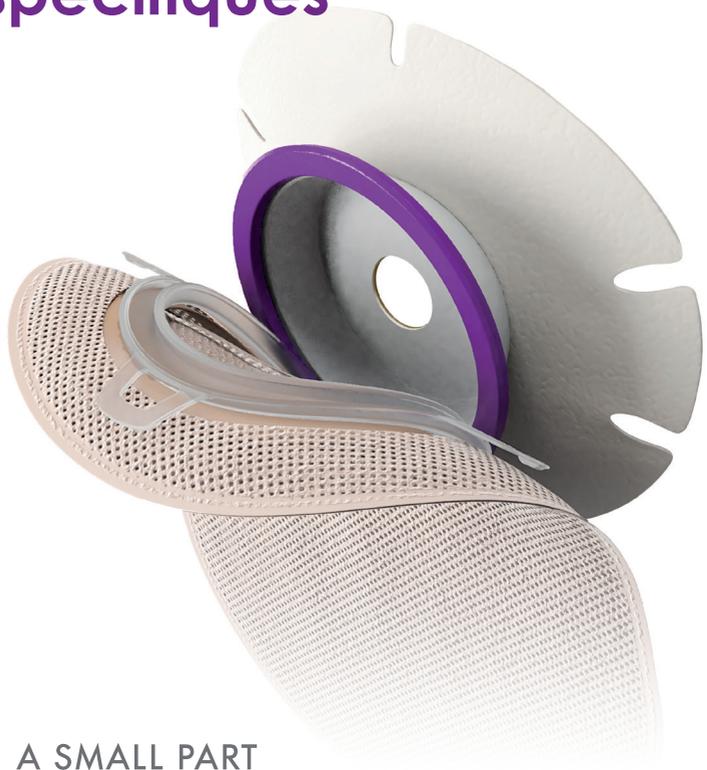

eakin  
dot<sup>®</sup>

A SMALL PART  
OF A BIGGER LIFE



Gérer une stomie peut s'avérer **difficile** pour n'importe qui, mais pour un stomisé ayant des **besoins spécifiques**, prendre soin de sa stomie peut représenter plus qu'un **défi**.<sup>1-6</sup>



A SMALL PART  
OF A BIGGER LIFE

Difficultés d'apprentissage



Déficiences visuelles



Mauvaise dextérité



Mobilité réduite



eakin **dot**<sup>®</sup> 2-pièces est conçu pour aider à surmonter ces difficultés. Et permettre aux personnes stomisées de mieux vivre.

1. Black P (2011) Caring for the patient with a stoma and dementia. *Gastrointestinal Nursing*, 9, 7, 19-24.
2. Powell C (2013) Using reflection to treat stoma patients with dementia. *Gastrointestinal Nursing*, 11, 7, 52-60.
3. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. *BJN* 19(17): s6-15
4. Colostomy UK Caring for a person with a stoma and dementia, December 2017, Copyright ©2016, 2017 Colostomy UK
5. Burch J (2016) Treating an older person with a stoma and comorbidities. *Nursing and Residential Care Journal* 18:2 68-70
6. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN) (2013) *Colostomy and Ileostomy: Products and tips*. Mt. Laurel, NJ: WOCN
7. eakin dot<sup>®</sup> 2-piece consumer trials on hydrocolloid for longer-life wear (n=162). Data on file (2017-18)

# Les **3 innovations uniques** de l'appareillage eakin **dot**<sup>®</sup> 2-pièces peuvent aider les personnes stomisées ayant des **besoins spécifiques**...

**Difficulté:** n'accepte pas la poche à stomie et essaie de la retirer<sup>1</sup>

## 1 Retrait en « tirant vers le bas » pour un contrôle optimal<sup>7</sup>

- ✓ eakin **dot**<sup>®</sup> 2-pièces **ne peut pas être retiré par erreur** ou en tirant simplement sur la poche.<sup>8</sup>
- ✓ Le système de retrait de la poche en **tirant vers le bas** offre un **meilleur contrôle** et une plus grande **facilité de changement de poche** pour les aidants.<sup>7</sup>



eakin **dot**<sup>®</sup> 2-pièces est **difficile à retirer par erreur**



### Antécédents médicaux :

- Jeune garçon atteint du syndrome de Down, vivant dans une famille d'accueil et ayant des antécédents d'incontinence fécale
- Décision de procéder à une colostomie chirurgicale

### Examen de l'infirmière :

- La famille et l'équipe médicale craignaient que le garçon **n'enlève l'appareillage**
- Un essai préopératoire de divers appareillages 2-pièces a été entrepris pour s'assurer que le produit choisi serait **fiable**

### Conclusion :

- Décision d'opter pour eakin **dot**<sup>®</sup> 2-pièces étant donné sa **facilité d'utilisation** et les propriétés du protecteur cutané longue durée **skinsmart**<sup>™\*</sup>
- Une famille d'accueil capable de s'occuper de l'enfant de façon autonome et une routine de **soins de stomie sans problème** rapidement établie
- Le garçon ne touche pas à la stomie et **ne peut pas retirer la poche en tirant dessus**



Cas soumis par  
Marijke Voskeuil,  
Infirmière spécialisée en soins  
de chirurgie pédiatrique, UMC  
Amsterdam,  
Centre médical universitaire

**Difficulté:** incapable de changer la poche<sup>9</sup>

## 2 Le protecteur cutané *skinsmart*<sup>™\*</sup> procure une adhérence plus efficace de leur appareillage<sup>7</sup>

- ✓ Il **adhère instantanément** à la peau, offrant une **durée de port prolongée** et une **sécurité renforcée**.
- ✓ Du fait que le support **reste en place plus longtemps**<sup>7</sup> il n'est pas nécessaire de changer de support aussi souvent, donc moins de soucis pour le patient.



eakin **dot**<sup>®</sup> 2-pièces pour **une tenue longue durée**



### Antécédents médicaux :

- Femme de 54 ans née avec une imperforation de l'anus, entraînant une incontinence fécale
- Souffrant de **détérioration de la mobilité** et de **perte de dextérité**
- Réalisation d'une colostomie en 2011

### Examen de l'infirmière :

- Eventration péristomiale relativement importante
- **Problèmes de peau péristomiale et fuites quotidiennes**
- Appareillage 1-pièce testé sans succès à cause des fuites et de la peau excoriée
- L'infirmière recommande l'appareillage eakin **dot**<sup>®</sup> 2-pièces avec anneau de 80 mm en raison de la taille de l'eventration



### Conclusion :

- **Plus du tout de fuites, confortable à porter et facile à appliquer et à retirer**
- **L'anneau de guidage violet a permis de coupler la poche au support plus facilement**
- **A pu garder le support pendant 3 jours**

Cas soumis par  
Petra Smeters  
Infirmière stomathérapeute,  
Institut de cancérologie  
Catharina, Eindhoven  
Pays-Bas

**Difficulté:** dextérité réduite<sup>5</sup>

## 3 L'anneau de guidage violet comme une aide visuelle<sup>7</sup>

- ✓ eakin **dot**<sup>®</sup> 2-pièces se révèle être **facile à utiliser** grâce à l'**anneau de guidage violet** comme aide visuelle, pour mettre en place l'appareillage et le « clic » audible signale le **couplage sécurisé** de la poche et du support.



eakin **dot**<sup>®</sup> 2-pièces est **facile à utiliser**



### Antécédents médicaux :

- Homme de 75 ans souffrant de mobilité réduite et vivant seul
- Cancer rectal diagnostiqué, réalisation d'une colostomie terminale
- Antécédents de maladies chroniques, comme la maladie de parkinson, des troubles bipolaires, de l'hypertension, une sténose aortique et de l'arthrose



Cas soumis par  
Kelly Vickers, infirmière  
stomathérapeute, Lyell McEwin  
Hospital, Adélaïde, Australie-  
Méridionale

### Examen de l'infirmière :

- L'infirmière stomathérapeute a recommandé eakin **dot**<sup>®</sup> 2-pièces immédiatement après l'intervention chirurgicale


### Conclusion :

- Il ne signale aucune fuite. Effet très positif - le patient a de nouveau confiance en lui ce qui a l'**effet très positif de lui redonner confiance**
- La **peau péristomiale est saine**
- **Le patient est autonome** pour sa routine de soins de stomie
- Il « **aime son appareillage** », en particulier le système de **couplage facile** et le « clic » lors de la mise en place de l'appareillage
- Malgré des tremblements de plus en plus intenses en raison de la maladie de Parkinson, **il peut facilement coupler le support avec la poche**

**Difficulté:** ne voit pas la poche ou le support

## LE PLUS anneau de guidage violet avec CLIC audible

- ✓ eakin **dot**® 2-pièces est **facile à clipser**, grâce à un anneau de guidage qui se soulève et qui laisse suffisamment de place aux doigts afin d'aligner la poche et le support.
- ✓ Une fois aligné, un **CLIC** audible indique que le système est **sûrement attaché** - renforce la **tranquillité d'esprit**

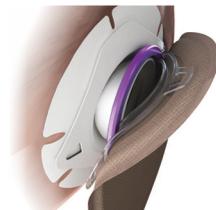

eakin **dot**® 2-pièces **facilite la gestion autonome de son appareillage**



### Antécédents du patient :

- Homme de 64 ans, déclaré aveugle.
- 2010-2014: Stomie temporaire pour un cancer du colon.
- 2019: Iléostomie pour une incontinence fécale. Grande stomie ovale avec éventration.

### Examen de l'infirmière :

- L'appareillage 2-pièces utilisé précédemment était difficile à utiliser et laissait apparaître des fuites.
- Cet homme était dépendant des soins à domicile.
- On lui recommande l'utilisation d'eakin **dot**® 2-pièces avec poche fermée.

### Conclusion :

- S'occupe lui-même des changements de poches, jusqu'à 3 par jour, et change parfois le support tout seul.
- Plus de fuite ce qui a permis d'améliorer sa confiance en soi et son indépendance - il lui est de nouveau possible d'avoir des fréquentations.
- Il a moins souvent besoin des soins à domicile



Cas soumis par  
Barbara Weterings &  
Annette Gardien, infirmières  
stomathérapeutes,  
HagaZiekenhuis, La Haye,  
Pays-Bas

# Guide des références appareillage eakin dot® 2-pièces

## Supports convexes

Référence produit	Taille stomie	Taille de l'anneau	Boîte de
839820	15-40mm	60mm	5
839821	20mm	60mm	5
839822	22.5mm	60mm	5
839823	25mm	60mm	5
839824	27.5mm	60mm	5
839825	30mm	60mm	5
839826	32.5mm	60mm	5
839827	35mm	60mm	5
839828	37.5mm	60mm	5
839829	40mm	60mm	5
839830	15-60mm	80mm	5

## Supports plans

Référence produit	Taille stomie	Taille de l'anneau	Boîte de
839800	15-37.5mm	60mm	10
839801	20mm	60mm	10
839802	22.5mm	60mm	10
839803	25mm	60mm	10
839804	27.5mm	60mm	10
839805	30mm	60mm	10
839806	32.5mm	60mm	10
839807	35mm	60mm	10
839808	37.5mm	60mm	10
839809	15-50mm	80mm	10
839810	40mm	80mm	10
839811	45mm	80mm	10
839812	50mm	80mm	10

## Poches fermées

Référence produit	Taille de la poche	Taille de l'anneau	Boîte de
839900FR	Mini	60mm	30
839901FR	Midi	60mm	30
839902FR	Maxi	60mm	30
839920FR	Midi	80mm	30
839921FR	Maxi	80mm	30

## Poches vidables

Référence produit	Taille de la poche	Taille de l'anneau	Boîte de
839903	Mini	60mm	30
839904	Midi	60mm	30
839905	Maxi	60mm	30
839922	Midi	80mm	30
839923	Maxi	80mm	30

Appelez-nous pour  
obtenir des échantillons



eakin® 

T: 01.70.77.04.29

E: [contact@eakin.fr](mailto:contact@eakin.fr)

W: [www.eakin.fr](http://www.eakin.fr)