

# Gestion des granulomes avec les

eakin  
**Cohesive**<sup>®</sup>  
seal

eakin  
**freeseal**<sup>®</sup>

Un granulome est une masse d'hypergranulation qui se forme suite à une inflammation lorsque le système immunitaire réagit à la présence d'un agent infectieux/ou d'un corps étranger <sup>1,2,3,4</sup>

Les facteurs contribuant à la formation de granulomes sont les suivants:

- Sutures<sup>1,2,3</sup>
- Traumatismes répétés <sup>2,5</sup>
- Irritation chronique due à l'exposition aux matières fécales <sup>2,5,6,7</sup>
- Vêtements ou ceintures serrés <sup>2</sup>
- Réaction allergique au matériau de la poche<sup>5</sup>



Bien que le nitrate d'argent pour cautériser les granulomes soit l'option thérapeutique la plus reconnue, la prévention de l'apparition des granulomes ou d'une irritation supplémentaire peut se révéler efficace.

Lisez la suite pour voir comment les joints **eakin**<sup>®</sup> peuvent être une option efficace dans la gestion des granulomes.

L'utilisation régulière d'un anneau **eakin**<sup>®</sup> peut faciliter la



### Les anneaux les plus absorbants du marché!\*

Protection entre la stomie et la peau, empêchant les selles d'atteindre cette dernière.



### Formule respectueuse de la peau

Un petit nombre d'ingrédients, respectueux pour la peau, pour éviter les irritations.

## Anneaux eakin **Cohesive**<sup>®</sup> stomawrap pour les s

Étude de cas soumise par: Marjon Valk, infirmière spécialisée dans les stomies et la continence Hôpital Be

### Antécédents

- Dame de 73 ans qui était très active et aimait marcher.
- 2011 : AVC entraînant une incontinence fécale et urinaire.
- 2018 : Formation d'une iléostomie en boucle.

### Problèmes rencontrés

- Stomie compliquée - à droite, granulome sur la muqueuse et à gauche inclinée et saillante.
- Stomie difficile à voir du fait de son emplacement.
- Lésions de la peau péristomiale dues à des fuites constantes.
- Insomnie due à des douleurs abdominales permanentes, y compris au niveau de la stomie.
- Changements fréquents de support – 5 fois par semaine. • Son système deux pièces était rigide, trop visible et inconfortable.

### Conseils de l'infirmière

Elle a d'abord changé de système deux pièces, puis est passé à un système une pièce, mais cela s'est avéré infructueux. **Les fuites continuaient et la peau péristomiale restait rouge et douloureuse.**

Une solution a été trouvée avec un appareillage 2 pièces eakin **dot**<sup>®</sup> et un anneau eakin **Cohesive**<sup>®</sup> stomawrap. L'anneau a été choisi pour sa découpe unique et sa forme ovale permettant une application facile - enveloppant la stomie pour créer un joint sécurisant.

Avant



# la prise en charge des granulomes



## Reste en place

Anneau souple et malléable qui crée un ajustement sûr et qui reste en place, évitant tout frottement ou friction.



## Durée de port prolongée

La prévention des fuites permet de prolonger la durée d'utilisation de la poche, ce qui réduit le fréquence de retrait au niveau de la peau ou les irritations répétées.

## stomies de grande taille et mal situées.

Arnhem, Uden, Pays-Bas

### Solution avec eakin Cohesive® stomawrap

#### Nouvelle routine régulière

- L'anneau prévient les fuites, réduisant les changements d'appareillage de 5, à 2 hebdomadaires.
- Les changements sont plus rapides, ne prenant que 15 minutes.
- L'indépendance a été restaurée et la dame peut changer elle-même sa poche en toute confiance.

**Peau:** L'état de la peau péristomiale s'est considérablement amélioré, il n'y a plus de fuites.

**Gestion de la stomie:** Avec quelques ajustements au niveau de la découpe du support et l'introduction de l'anneau, une bonne routine a été établie.

**Une vie plus riche:** La sérénité a été rétablie - après une longue lutte, la tranquillité d'esprit est revenue et cette dame est satisfaite de ses soins de stomie.



Amélioration de la peau

# dans la gestion des complications cutanées péristomiales et de l'hyper granulation

Étude de cas soumise par Marjon Gerbrands, Infirmière stomathérapeute, Pays-Bas

## Antécédents

- Femme de 69 ans. dans la gestion des complications cutanées péristomiales et de l'hyper granulation
- 2017 : Tumeur rectale traitée par chimiothérapie et radiothérapie. Rémission et orientation vers une étude « Wait and See ».
- 2019 : Réapparition du cancer du rectum entraînant la formation d'une colostomie.

## Problèmes rencontrés

- À partir de 2020, des douleurs dans la stomie sont apparues sans qu'aucune anomalie ne soit visible.
- Plus tard en 2020, des boursouflures sont apparues à la jonction muco-cutanée qui ressemblaient à une hypergranulation superficielle.
- Traitement au nitrate d'argent, au Terracotril, à l'Aldanex, à la lidocaïne, anneaux protecteurs et au Prontosan, sans amélioration.
- 2021: Une opération pour tenter de reprendre la stomie a été réalisée mais les problèmes ont persisté et la stomie s'est rétractée.
- Une **hypergranulation superficielle très douloureuse** est réapparue et a été traitée avec du nitrate d'argent. Bien qu'elle ait partiellement réussi, la sensibilité de la peau est restée.
- Les changements de poche étaient effectués 2 à 3 fois par jour à cause de la douleur de la peau péristomiale.

## Conseils de l'infirmière

A essayé plusieurs anneaux et poches sans succès. **L'hypergranulation et la peau péristomiale douloureuse** sont restées.

Laura Han, infirmière en stomathérapie, Centre médical de Haaglanden, a présenté eakin **freeseal**<sup>®</sup> avec une poche convexe souple **eakin**<sup>®</sup>.

Avant



## La solution avec eakin freeseal®

Après 2 ans de recherche d'une solution, eakin **freeseal**® a permis de trouver la routine de soins adéquate à cette personne.

**La peau:** L'hypergranulation a presque disparu et la peau péristomiale a complètement guéri.

**Gestion de la stomie:** Un seul changement de poche par jour, sans traitement supplémentaire.

**Une vie plus riche:** Cette dame se sent en sécurité dans sa routine, n'a plus de douleur et n'a plus à penser à sa stomie. Elle a déclaré:

*«J'ai enfin retrouvé une vie normale et je suis devenue une personne stomisée ordinaire!»*



## Impact économique avec eakin freeseal®

Dans cette étude de cas, les soins de stomies ont été réduits de 2-3, à 1 par jour. Cela a pour résultat:

**Les besoins en produits** ont été réduits par **60%.\***

Cela induit d'autres avantages comme:

- Des coûts annuels réduits sur les besoins en produits
- Pas besoin de produits supplémentaires pour les complications de la peau péristomiale et l'hypergranulation
- Economies de temps pour les Professionnels de Santé car moins de traitement à prodiguer.
- Un impact positif sur l'environnement avec moins de déchets de produits.
- 

Et, plus important, une réelle amélioration de **la qualité** de vie pour cette dame.

\*estimation sur un usage moyen de poches et d'anneaux détaillés dans cette étude de cas.



Dans les deux cas, après plus d'un an de difficultés et l'utilisation de différents produits et marques, les soins de stomie ont été adaptés pour y intégrer un anneau **eakin**<sup>®</sup>.

Les soins – auparavant inefficaces – ont été simplifiés avec **eakin**<sup>®</sup>, ce qui a eu pour résultat:



Une durée de port prolongée



La suppression des fuites



Une amélioration de l'état de la peau péristomiale



Une amélioration du confort et de la capacité à reprendre des activités régulières



Faites des anneaux **eakin**<sup>®</sup> votre premier choix, **tous les jours**

eakin<sup>®</sup> 

FR: **01.70.77.04.29** |  
contact@eakin.fr  
www.eakin.fr